

ANTYKLESZCZ - PRZYRZĄD DO USUWANIA JADU I KLESZCZY



Antykleszcz to przyrząd do usuwania jadu i kleszczy. Urządzenie działa na zasadzie pompki odsysającej. Nadaje się do odessania (aspiracji) jadu owadów tj. komary, osy, pszczoły, szerszenie.

Kod produktu: PK.01

GTIN: 5907599929062

Kod produktu: DRO-001

GTIN: 5907599929062

16,00 zł z VAT, 14,81 zł netto

Opis

Antykleszcz to przyrząd do usuwania jadu i kleszczy. Urządzenie działa na zasadzie pompki odsysającej. Nadaje się do odessania (aspiracji) jadu owadów tj. komary, osy, pszczoły, szerszenie oraz żmii czy skorpiona. Ponadto służy do usuwania kleszczy z ciała człowieka. Powstała w urządzeniu próżnia odsysa całego kleszcza z ciała, nie pozostawiając żadnych jego fragmentów. Dzięki gumowej uszczelce skuteczność pompki zapewniona jest przez długi czas. Przyrząd doskonale nadaje się do udzielania pierwszej pomocy. Pamiętaj, że po ukąszeniach owadów, węży i skorpionów oraz przy zakażeniach okolic ukąszeń należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Sposób użycia

1. przygotuj przyrząd do użycia – wciśnij gumowy tłok do oporu
2. przyłóż końcówkę do skóry w miejscu wprowadzenia jadu lub wczepienia się kleszcza
3. dociśnij przyrząd do ciała i wyciągaj powoli tłok
4. miejsce ukąszenia powinno znajdować się w centralnym położeniu końcówki
5. przytrzymuj przyrząd w tej pozycji przez około 10-15 sekund, w razie potrzeby powtórz zabieg
6. zdezynfekuj miejsce ukąszenia środkami odkażającymi
7. końcówkę przyrządu przemyj wodą z mydłem, a później zdezynfekuj środkiem odkażającym

Przeciwwskazania

Nie używać przyrządu na zranionej skórze, w okolicach oczu, zewnętrznych narządów płciowych. Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

P.H.P.U. JANPOL, Polska

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

P.H.P.U. JANPOL, Polska

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.