

# APARAT DO PŁUKANIA OKA



Aparat do płukania oka APO przeznaczony jest do przepłukiwania czystą wodą lub innym stosownym płynem zaprószonego ciała obcego oczu. Może mieć zastosowanie w nagłych wypadkach w pracy, w podróży oraz w gospodarstwie domowym i powinien być ważnym elementem wyposażenia podręcznej apteczki pierwszej pomocy.

**Kod produktu:** 092

**GTIN:** 5902138051006

---

**Kod produktu:** DRO-002

**GTIN:** 5902138051006

**24,00 zł z VAT, 22,22 zł netto**

## Opis

Aparat do płukania oka APO przeznaczony jest do przepłukiwania czystą wodą lub innym stosownym płynem zaprószonego ciała obcego oczu. Może mieć zastosowanie w nagłych wypadkach w pracy, w podróży oraz w gospodarstwie domowym i powinien być ważnym elementem wyposażenia podręcznej apteczki pierwszej pomocy.

## Skład zestawu

- pojemnika 0,25 l
- wanienka z sitkiem
- pokrywka na wanienkę
- rurka

## Sposób użycia

- odczepić wanienkę od pojemnika
- pojemnik napełnić 250 ml wody lub soli fizjologicznej NaCl 0.9%
- ponownie zamontować wanienkę na pojemnik i zdjąć pokrywę
- pochylić głowę i przyłożyć szczelnie krawędzie wanienki do oczodołu
- ściskając dłońią pojemnik spowoduj wypływ płynu i przepłukanie zaprószonego oka do momentu usunięcia ciała obcego
- po użyciu aparat przepłukać, osuszyć i umieścić w woreczku

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

Stanmark Mark Kubik, Polska

**Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

Stanmark Mark Kubik, Polska

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.