

APARAT DO PŁUKANIA OKA



Aparat do płukania oka APO przeznaczony jest do przepłukiwania czystą wodą lub innym stosownym płynem zaprószonego ciała obcego oczu. Może mieć zastosowanie w nagłych wypadkach w pracy, w podróży oraz w gospodarstwie domowym i powinien być ważnym elementem wyposażenia podręcznej apteczki pierwszej pomocy.

Kod produktu: 092

GTIN: 5902138051006

Kod produktu: DRO-002

GTIN: 5902138051006

24,00 zł z VAT, 22,22 zł netto

Opis

Aparat do płukania oka APO przeznaczony jest do przepłukiwania czystą wodą lub innym stosownym płynem zaprószonego ciała obcego oczu. Może mieć zastosowanie w nagłych wypadkach w pracy, w podróży oraz w gospodarstwie domowym i powinien być ważnym elementem wyposażenia podręcznej apteczki pierwszej pomocy.

Skład zestawu

- pojemnika 0,25 l
- wanienska z sitkiem
- pokrywka na wanienkę
- rurka

Sposób użycia

- odczepić wanienkę od pojemnika
- pojemnik napełnić 250 ml wody lub soli fizjologicznej NaCl 0.9%
- ponownie zamontować wanienkę na pojemnik i zdjąć pokrywkę
- pochylić głowę i przyłożyć szczelnie krawędzie wanienki do oczodołu
- ściskając dłonią pojemnik spowoduj wypływ płynu i przepłukanie zaprószonego oka do momentu usunięcia ciała obcego
- po użyciu aparat przepłukać, osuszyć i umieścić w woreczku

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Stanmark Mark Kubik, Polska

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Stanmark Mark Kubik, Polska

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.