


ELDON™ BLOOD TYPING KIT - TEST DO BADANIA GRUPY KRWI

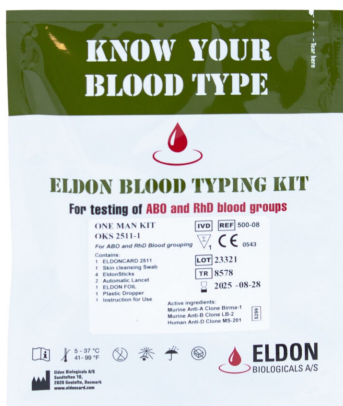

Zestaw Eldon One Man Kit to innowacyjny produkt diagnostyczny umożliwiający szybkie określanie grupy krwi w trudnych warunkach w terenie.

Kod produktu: 500-08

Kod produktu: RT-128

40,00 zł z VAT, 37,04 zł netto

Opis

Zestaw Eldon One Man Kit to innowacyjny produkt diagnostyczny umożliwiający szybkie określanie grupy krwi w trudnych warunkach w terenie. Może być przydatny np. podczas klęsk żywiołowych, miejsc wystąpienia konfliktów czy przy zdarzeniach masowych. Spełni swoją rolę w każdej awaryjnej sytuacji, gdy musimy poznać szybko grupę krwi poszkodowanego np. przy konieczności wykonania transfuzji. Otrzymanie krwi niezgodnej z własną grupą krwi może spowodować poważną reakcję immunologiczną, która może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia.

Eldon One Man Kit bada i klasyfikuje grupę krwi według dwóch elementów: systemu grupowania ABO i czynnika Rhesus (Rh), który jest albo obecny (Rh dodatni), albo nieobecny (Rh ujemny).

Zestaw nie wymaga skomplikowanego procesu chłodniczego w transporcie oraz przy przechowywaniu. Ma okres przydatności do użycia wynoszący 24 miesiące od produkcji w temperaturze od 5 do 37 stopni Celsjusza. Ponadto jest bardzo prosty w obsłudze, a wyniki są dostępne już po 2 min od rozpoczęcia badania na specjalnej karcie Eldoncard wielkości karty kredytowej. Do wykonania testu nie są wymagane specjalne umiejętności, może być on przeprowadzony przez każdego, wystarczy postępować zgodnie z instrukcją producenta.

Charakterystyka produktu

- określa grupę krwi w zakresie systemu grupowania ABO i czynnika Rhesus (Rh)
- wyniki dostępne w ciągu zaledwie 2 minut
- wyrób medyczny do samokontroli, produkt jednorazowego użytku,
- waga produktu: 27 gram
- wymiary opakowania: 15.5 × 14 × 0.5 cm
- wyrób medyczny do samokontroli, produkt jednorazowego użytku,

Skład zestawu

- EldonCard do badania krwi
- sterylny lancet jednorazowego użytku

- pipeta (zakraplacz)
- wacik nasączony alkoholem
- EldonSticki - 4 szt.
- instrukcja obsługi

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Eldon Biologicals A/S, Dania

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Eldon Biologicals A/S, Dania

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.