

ELEKTRODY TRENINGOWE PRIMEDIC HEARTSAVE Y / YA

Elektrody uniwersalne do defibrylatorów Primedic HearSave.

Pasują do defibrylatorów AED z serii HeartSave: Y i YA.

Informacje ogólne:

- elektrody wielofunkcyjne do defibrylacji, stymulacji i kardiowersji,
 - uniwersalne (rozmiar dla dorosłych i dzieci),
 - jednorazowe, samoprzylepne,
 - do 50 wstrząsów z energią 360 J,
 - nie używać elektrod, których termin ważności upłynął,
 - każda elektroda jest pokryta warstwą klejącego żelu, jeśli żel nie przykleja się prawidłowo, należy wymienić elektrody na nowe,
 - elektrody dostarczane są z kablem przyłączeniowym – wystający poza opakowanie fragment kabla z wtyczką, może być podłączony do AED od razu po zakupie urządzenia, dzięki czemu czas działania w razie zagrożenie życia jest krótszy,
 - elektrody opakowane są w grubą folię chroniącą przed uszkodzeniem. Zaleca się sprawdzać opakowanie elektrod przed ich użyciem pod kątem uszkodzeń i jeśli opakowanie jest uszkodzone, nie powinno się ich użyć.
- Elektrody Primedic do HeartSave Y i YA są elektrodami uniwersalnymi i mogą być użyte do defibrylacji zarówno osób dorosłych jak i dzieci. W przypadku defibrylacji osób dorosłych, elektrody przykleja się w pozycji przód-przód, w przypadku dzieci w pozycji przód-tył. Instrukcja jak przymocować poprawnie elektrody do pacjenta znajduje się na opakowaniu, a także na każdej z elektrod.
-



Elektrody uniwersalne do defibrylatorów Primedic HearSave.

Pasują do defibrylatorów AED z serii HeartSave: Y i YA.

Informacje ogólne:

- elektrody wielofunkcyjne do defibrylacji, stymulacji i kardiowersji,
- uniwersalne (rozmiar dla dorosłych i dzieci),
- jednorazowe, samoprzylepne,
- do 50 wstrząsów z energią 360 J,
- nie używać elektrod, których termin ważności upłynął,
- każda elektroda jest pokryta warstwą klejącego żelu, jeśli żel nie przykleja się prawidłowo, należy wymienić elektrody na nowe,
- elektrody dostarczane są z kablem przyłączeniowym – wystający poza opakowanie fragment kabla z wtyczką, może być podłączony do AED od razu po zakupie urządzenia, dzięki czemu czas działania w razie zagrożenie życia jest krótszy,
- elektrody opakowane są w grubą folię chroniącą przed uszkodzeniem. Zaleca się sprawdzać opakowanie elektrod przed ich użyciem pod kątem uszkodzeń i jeśli opakowanie jest uszkodzone, nie powinno się ich użyć.

Elektrody Primedic do HeartSave Y i YA są elektrodami uniwersalnymi i mogą być użyte do defibrylacji zarówno osób dorosłych jak i dzieci. W przypadku defibrylacji osób dorosłych, elektrody przykleja się w pozycji przód-przód, w przypadku dzieci w pozycji przód-tył. Instrukcja jak przymocować poprawnie elektrody do pacjenta znajduje się na opakowaniu, a także na każdej z elektrod.

UWAGA! Klejąca substancja pokrywająca elektrody zapewnia optymalne przyleganie powierzchni elektrod do skóry pacjenta. Dlatego też nie należy otwierać opakowania elektrod, jeśli ich zastosowanie nie jest wymagane. Należy też okresowo kontrolować termin ważności elektrod.

Specyfikacja:

- powierzchnia elektrod: całkowita powierzchnia ok. 105 cm², powierzchnia klejąca ok. 85 cm², powierzchnia żelu / powierzchnia aktywna ok. 68 cm²,
- całkowita długość kabla: 130 cm (wewnątrz opakowania: 105 cm, na zewnątrz: 25 cm),
- okres przydatności: do 36 miesięcy.

Elektrody Primedic SavePads PreConnect-Set sprzedawane są w zestawie z miniapteczką.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.