

FANTOM DZIECKA Z DIODAMI LED PRESTAN CHILD



Fantom szkoleniowy Prestan Child to wiernie odwzorowany tors dziecka w wieku około 7 lat, dedykowany do prowadzenia szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED.

Kod produktu: PP-CM-100M-MS

GTIN: 811675020251

Kod produktu: FAN-000

GTIN: 811675020251

1,050,00 zł z VAT, 853,66 zł netto

Opis

Fantom szkoleniowy Prestan Child to wiernie odwzorowany tors dziecka w wieku około 7 lat, dedykowany do prowadzenia szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED. W manekinie uwzględniono wszystkie niezbędne elementy anatomii dziecka tak, aby umożliwić realistyczny trening podstawowych umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. O poprawności wykonywanych uciśnień informuje widoczna dioda LED, która zmienia kolor na czerwony lub zielony.

Rozwiązania wspomagające zajęcia szkoleniowe

Fantom szkoleniowy Prestan Child posiada kilka rozwiązań, które pomagają instruktorom w prowadzeniu zajęć i przekazują informacje zwrotne na temat jakości wykonywanych ćwiczeń. Zaliczamy do nich:

- wbudowany **wskaźnik świetlny** (kolorowe diody LED), który informuje czy kursant wykonuje uciski klatki piersiowej w prawidłowym tempie i z odpowiednią siłą, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). Przy każdym ucisku wykonanym przez kursanta, na torsie manekina zapala się odpowiednia lampka określająca jakość ostatniego ruchu
- charakterystyczny sygnał dźwiękowy „**klik-klak**”, który informuje, że poziom kompresji klatki piersiowej przy ucisku osiągnął prawidłową wartość 5 – 6 cm
- unikalny **mechanizm dostosowujący siłę ucisku** klatki piersiowej, który pozwala poczuć kursantowi odpowiedni opór, gdy przekroczy wymagalny poziom kompresji
- wymienione systemy informacji zwrotnej tworzą razem efektywny mechanizm weryfikacji działań kursanta w czasie rzeczywistym, w którym szkolona osoba widzi (diody LED), słyszy (system “klik-klak”) i czuje (system oporowy)

Właściwości produktu w realizacji realistycznych szkoleń

Fantom Prestan daje kursantowi możliwość prowadzenia wszystkich działań ratowniczych z zakresie pierwszej pomocy (BLS). Manekin charakteryzuje bardzo dobre odwzorowanie anatomiczne budowy ciała dziecka, co sprawia, że zajęcia szkoleniowe są bardzo realistyczne. W tym zakresie ważną rolę odgrywa:

- wzorowe odtworzenie anatomii i fizjonomii dziecka w wieku około 7 lat
- widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne takie jak żebra, mostek i sutki, które pomagają zlokalizować właściwe miejsce ucisku oraz przyklejenia elektrod defibrylatora AED
- mechanizm wymagający odchylenie głowy do tyłu w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych
- widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji
- rękoczyn uciśnięcia nadbrzusza, który daje możliwość nauki techniki udzielenia pomocy przy zadławieniu

Charakterystyka użytkowa

Prestan Child to wysokiej jakości produkt szkoleniowy, który posiada **najdłuższą na rynku gwarancję** producencką wynoszącą **3 lata** od momentu zakupu (standardem dla podobnych produktów jest gwarancja na okres 2 lat). To co warto podkreślić, to również jego właściwości użytkowe. Manekin bardzo łatwo utrzymać w czystości, gdyż skóra fantomu jest łatwo zmywalna. Ponadto, Prestan Child jest kompaktowy i lekki, co ma znaczący wpływ na komfort przy jego transporcie. Do tego celu służy nam torba transportowa znajdująca się w zestawie z fantomem, która może być także wykorzystywana jako mata podczas szkoleń.

- masa produktu: 2,72 kg
- przybliżone wymiary: 18 x 36 x 58 cm
- gwarancja: 3 lata od momentu zakupu

Opis działania wskaźnika LED

Fantom wyłączony lub w trybie uśpienia	
W przypadku pierwszego pełnego ucisku wykonywany jest test diod LED	
Poniżej 60 ucisków na minutę	
Od 60 do 79 ucisków na minutę	
Od 80 do 99 ucisków na minutę	
Od 100 do 120 ucisków na minutę	
Powyżej 120 ucisków na minutę (żółta dioda miga)	
Przerwanie uciskania klatki piersiowej (czerwona dioda miga)	

Skład oferowanego zestawu

- fantom dziecka PRESTAN Child ze wskaźnikiem LED,
- 10 dróg oddechowych,
- torbę transportową / matę do ćwiczeń,
- 3 letnią gwarancję.

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

PRESTAN Products, LLC

5101 Naiman Parkway,

Solon, OH 44139

Stany Zjednoczone

+1 800 434 7989

info@prestanproducts.com

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

PRESTAN Europe B.V.

Celsiusstraat 15

6003 DG Weert

Holandia

+31 495 76 01 55

info@prestaneurope.eu

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

PRESTAN Products, LLC 5101 Naiman Parkway, Solon, OH 44139 Stany Zjednoczone +1 800 434 7989

info@prestanproducts.com

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.