

# FANTOM KOBIETY Z APLIKACJĄ PRESTAN 2000



Fantom szkoleniowy PRESTAN 2000 to najbardziej zaawansowany fantom z serii PRESTAN. Jest to wiernie odwzorowany tors kobiety z rozbudowanym systemem informacji zwrotnej, dedykowany do prowadzenia szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED.

**Kod produktu:** PP-AFM-2000-1-MS

**GTIN:** 811675021845

---

**Kod produktu:** FAN-201

**GTIN:** 811675021845

**1,390,00 zł z VAT, 1,130,08 zł netto**

## Opis

Fantom szkoleniowy Prestan 2000 to najbardziej zaawansowany fantom z serii Prestan. Jest to wiernie odwzorowany tors kobiety z rozbudowanym systemem informacji zwrotnej, dedykowany do prowadzenia szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED. To co sprawia, że amerykańska marka PRESTAN odniosła globalny sukces i cieszy się bardzo dobrą reputacją na całym świecie, to świetna jakość oferowanych produktów przy zachowaniu bardzo atrakcyjnych cen. Wszystkie fantomy PRESTAN cechuje wysoka jakość wykonania, precyzyjne odwzorowanie budowy anatomicznej człowieka i ciekawe rozwiązania podwyższające jakość kształcenia i komfort prowadzenia zajęć.

## Rozwiązania wspomagające zajęcia szkoleniowe

Fantom szkoleniowy Prestan 2000 posiada kilka rozwiązań, które pomagają instruktorom w prowadzeniu zajęć i przekazują informacje zwrotne na temat jakości wykonywanych ćwiczeń. Zaliczamy do nich:

- bezpłatną aplikację **Prestan CPR Feedback**, którą można pobrać na dowolne urządzenie mobilne działające na systemie Android lub iOS. Aplikacja łączy się bezprzewodowo z fantomem, co umożliwia uzyskanie wielu informacji w czasie rzeczywistym dotyczących jakości wykonywanych ćwiczeń, w tym m. in. określenie **tempa i głębokości ucisków** „masażu serca”, występowanie lub też nie **relaksacji** klatki piersiowej, oszacowanie stopnia **wentylacji** oraz sprecyzowanie **czasu beczynności**
- wbudowany **wskaźnik świetlny** (kolorowe diody LED), który informuje czy kursant wykonuje uciski klatki piersiowej w prawidłowym tempie i z odpowiednią siłą, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). Przy każdym ucisku wykonanym przez kursanta, na torsie manekina zapala się odpowiednia lampka określająca jakość ostatniego ruchu

- charakterystyczny sygnał dźwiękowy „**klik-klak**”, który informuje, że poziom kompresji klatki piersiowej przy ucisku osiągnął prawidłową wartość 5 – 6 cm
- unikalny **mechanizm dostosowujący siłę ucisku** klatki piersiowej, który pozwala poczuć kursantowi odpowiedni opór, gdy przekroczy wymagalny poziom kompresji
- wymienione systemy informacji zwrotnej tworzą razem efektywny mechanizm weryfikacji działań kursanta w czasie rzeczywistym, w którym szkolona osoba widzi (diody LED), słyszy (system „klik-klak”) i czuje (system oporowy). Ponadto, aplikacja mobilna umożliwia dokładną analizę działań kursanta

### **Aplikacja Prestan CPR FEEDBACK**

Obsługa aplikacji Prestan CPR Feedback jest bardzo intuicyjna i pomocna. Dzięki niej, instruktor ma kontrolę nad przebiegiem zajęć w czasie rzeczywistym, natomiast kursant otrzymuje możliwość wnikliwej analizy wyników jakościowych wszystkich etapów resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). Aplikację można pobrać bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, używając poniższe linki.

1. [system iOS](#)
2. [system ANDROID](#)

### **Właściwości produktu w realizacji profesjonalnych szkoleń**

Fantom Prestan 2000 daje kursantowi możliwość prowadzenia wszystkich działań ratowniczych z zakresie pierwszej pomocy (BLS). Manekin charakteryzuje bardzo dobre odwzorowanie anatomiczne budowy ciała dorosłej kobiety, co sprawia, że zajęcia szkoleniowe są bardzo realistyczne. W tym zakresie ważną rolę odgrywa:

- wzorowe odtworzenie anatomii i fizjonomii dorosłej kobiety
- widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne takie jak żebra, mostek, piersi i sutki, które pomagają zlokalizować właściwe miejsce ucisku oraz przyklejenia elektrod defibrylatora AED
- mechanizm wymagający odchylenie głowy do tyłu w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych
- widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji
- rękoczyn uciśnięcia nadbrzusza, który daje możliwość nauki techniki udzielenia pomocy przy zadławieniu

### **Charakterystyka użytkowa**

Prestan 2000 to wysokiej jakości produkt szkoleniowy z ciekawymi funkcjami szkoleniowymi. Manekin bardzo łatwo utrzymać w czystości, gdyż skóra fantomu jest łatwo zmywalna. Ponadto, Prestan 2000 jest kompaktowy i lekki, co ma znaczący wpływ na komfort przy jego transporcie. Do tego celu służy nam torba transportowa znajdująca się w zestawie z fantomem, która może być także wykorzystywana jako mata podczas szkoleń.

- gwarancja: 1 rok od momentu zakupu

### **Opis działania wskaźnika LED**

|                                                                     |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Fantom wyłączony lub w trybie uśpienia                              |   |
| W przypadku pierwszego pełnego ucisku wykonywany jest test diod LED |  |
| Poniżej 60 ucisków na minutę                                        |  |
| Od 60 do 79 ucisków na minutę                                       |  |
| Od 80 do 99 ucisków na minutę                                       |  |
| Od 100 do 120 ucisków na minutę                                     |  |
| Powyżej 120 ucisków na minutę<br>(żółta dioda miga)                 |  |
| Przerwanie uciskania klatki piersiowej<br>(czerwona dioda miga)     |  |

### Skład oferowanego zestawu

- fantom kobiety z diodami LED i aplikacją Prestan
- 10 szt. wymiennych dróg oddechowych
- torba transportowa, która pełni także rolę maty ćwiczeniowej

### Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

### Producent

PRESTAN Products, LLC  
5101 Naiman Parkway,  
Solon, OH 44139  
Stany Zjednoczone  
+1 800 434 7989  
info@prestanproducts.com

### Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

PRESTAN Europe B.V.  
Celsiusstraat 15  
6003 DG Weert  
Holandia

+31 495 76 01 55

info@prestaneurope.eu

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## **Producent**

PRESTAN Products, LLC 5101 Naiman Parkway, Solon, OH 44139 Stany Zjednoczone +1 800 434 7989

info@prestanproducts.com

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.