

# LIFEVAC LV14 - URZĄDZENIE DO UDRAŻNIANIA DRÓG ODDECHOWYCH, W SASZETCE



LifeVac to opatentowane urządzenie opracowane w celu udrażniania dróg oddechowych osoby, która się krztusi lub dławi. Jest wykorzystywane jako uzupełnienie standardowej procedury pierwszej pomocy w sytuacji, gdy ta nie przynosi pożądanego skutku.

**Kod produktu:** LV14

**GTIN:** 5065007352038

---

**Kod produktu:** TLE-082

**GTIN:** 5065007352038

**412,00 zł z VAT, 381,48 zł netto**

## Opis

LifeVac to opatentowane urządzenie opracowane w celu udrażniania dróg oddechowych osoby, która się krztusi lub dławi. Jest wykorzystywane jako uzupełnienie standardowej procedury pierwszej pomocy w sytuacji, gdy ta nie przynosi pożądanego skutku. LifeVac nie wymaga szczególnej wiedzy ani przeszkolenia, może być stosowany przez każdego. Sam mechanizm działania opiera się na zassaniu ciała obcego z dróg oddechowych poszkodowanego. Jest to rozwiązanie nieinwazyjne, bezpieczne, a co najważniejsze skuteczne. Urządzenie nie posiada żadnego elementu, który musimy wprowadzić do jamy ustnej i dróg oddechowych. Nie powoduje uszkodzeń dziąseł, zębów, podniebienia lub języka. LifeVac jest wyrobem jedнокrotnego użycia i jest dostarczany w stanie niesterylnym.

Pojedynczy produkt jest zapakowany w torbę turystyczną razem z czterema maskami twarzowymi i broszurą z instrukcją użycia.

### Skład zestawu:

- urządzenie ssące LifeVac,
- torba turystyczna,
- maska duża,
- maska średnia (do testów)
- maska mała,
- maska pediatryczna,
- instrukcję obsługi

Działanie urządzenia opiera się na trzech prostych krokach - przyłóż - przyciśnij - pociągnij.

1. Przyłóż maskę do twarzy obejmując szczelnie usta i nos
2. Przyciśnij rączkę urządzenia w kierunku twarzy
3. Pociągnij za rączkę do siebie

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

LifeVac Europe Ltd., Wielka Brytania

### **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

CMC Medical Devices & Drugs SL, Hiszpania

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

LifeVac Europe Ltd., Wielka Brytania

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.