


OPASKA UCISKOWA, STAZA TAKTYCZNA SOFT GEN 5

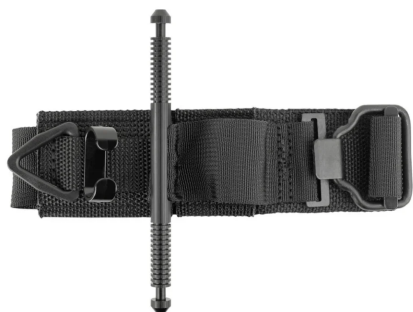

Staza taktyczna została stworzona do tamowania bardzo silnych krwotoków w sytuacji zranienia kończyn lub amputacji urazowych.

Kod produktu: 84-0009

GTIN: 818630015444

Kod produktu: RT-049

GTIN: 818630015444

159,00 zł z VAT, 147,22 zł netto

Opis

SOF® Tourniquet 5. generacji to zaawansowana wersja jednego z najbardziej efektywnych opasek zaciskowych na rynku, modelu SOFTT-W.

Główne zmiany i innowacje w stosunku do poprzednich generacji opaski SOFTT Gen 5:

- **Ulepszony krępulec** – “odchudzony” dla lepszej wydajności.
- **Wskaźnik luzu na taśmie zaciskowej (Slack Indicator Wedge)** – ułatwia odpowiednie ułożenie taśmy i zebranie nadmiaru taśmy przed założeniem opaski.
- **TRACK (Tourniquet Retention Assistance Clip)** – nowy uchwyt do chwilowego blokowania krępulca, który w poprzednich generacjach nie był obecny. Należy pamiętać, że pełne zablokowanie krępulca wymaga założenia trójkąta blokującego (Tri-Ring Lock). Nowy TRACK w opasce SOFTT jest sztywniejszy i twardszy niż w opasce SOFTT-W Gen 4.
- **Mniejsza i lżejsza konstrukcja** – opaska SOFTT jest bardziej kompaktowa w porównaniu do poprzedniej generacji SOFTT-W Gen 4.
- **Nowa klamra** – umożliwia szybsze i łatwiejsze zakładanie opaski jedną ręką.
- **Nowy pasek** – bardziej delikatny i mniej sztywny, co upraszcza i przyspiesza aplikację opaski bez konieczności regulowania docisku. Pasek łatwo przesuwają się przez klamrę z tworzywa, co sprawia, że zakładanie opaski jedną ręką jest łatwe i szybkie.

Nowa konstrukcja opaski SOFTT sprawia, że jej użytkowanie jest jeszcze prostsze, niezależnie od tego, czy zakłada się ją na rękę, czy nogę. Dzięki temu opaska może być aplikowana szybciej, co zmniejsza ryzyko utraty krwi przez poszkodowanego.

Możliwość samodzielnego założenia:

Opaska SOFTT może być założona przez rannych samodzielnie, jedną ręką, na każdej kończynie, w ramach samopomocy.

Dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji, wykonanej z wysokiej jakości materiałów, opaska SOFTT jest praktycznie niezniszczalna. Jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i działa w każdych warunkach terenowych i klimatycznych.

Opaska zaciskowa SOFTT jest przeznaczona do tamowania krwotoków z kończyn w przypadku masywnych krwawień tętnicznych lub żylnych. Jej konstrukcja umożliwia założenie i zaciśnięcie opaski jedną ręką na każdej kończynie, zarówno prawej, jak i lewej. System zamknięcia zapobiega przypadkowemu rozpięciu się opaski w wyniku zahaczenia o elementy otoczenia.

Możliwości zastosowania:

- Założenie na kończynie górnej lub dolnej.
- Możliwość założenia jedną ręką na każdej kończynie.
- Samodzielne założenie przez osobę ranną w ramach samopomocy, jedną ręką, na każdej kończynie.

Wymiary złożonej opaski: około 14 x 4,5 cm

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

TacMed Solutions, LLC, Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Casus Europe B.V., Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

TacMed Solutions, LLC, Stany Zjednoczone