

# OPATRUNEK INDYWIDUALNY OLAES MODULAR 4"



Opatrunek OLAES został zaprojektowany z myślą o trudnych warunkach pola walki, opierając się na doświadczeniach jednostek specjalnych z Iraku i Afganistanu.

**Kod produktu:** OAL-4

**GTIN:** 818630010296

---

**Kod produktu:** RT-002

**GTIN:** 818630010296

**43,00 zł z VAT, 39,81 zł netto**

## Opis

Opatrunek OLAES został zaprojektowany z myślą o trudnych warunkach pola walki, opierając się na doświadczeniach jednostek specjalnych z Iraku i Afganistanu.

Opatrunek OLAES znajduje się w sterylnym, hermetycznym opakowaniu, w którym panuje próżnia. Dzięki temu rozmiar opatrunku zostaje zredukowany, co umożliwia wygodne przymocowanie go do kamizelki taktycznej, hełmu lub schowanie w plecaku. OLAES to kompleksowe rozwiązanie „wszystko w jednym”, które można wykorzystać do opatrywania różnych typów ran.

Opatrunek może być stosowany zarówno przez ratowników medycznych, jak i przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie pierwszej pomocy. Z pomocą OLAES ratownik może wyciągnąć z kompresu jałową gazę o gęstej, nieregularnej strukturze, która pozwala na precyzyjny ucisk w odpowiednim miejscu. Gazy używa się do usuwania ciał obcych z rany i jej okolic. Następnie gazę należy owinąć kompresem nieprzywierającym do rany i zabezpieczyć bandażem elastycznym, co chroni ranę przed zanieczyszczeniami i zapewnia skuteczny ucisk.

Gaza może być również użyta do jednoczesnego zaopatrzenia rany wlotowej i wylotowej (zgodnie z nowymi wytycznymi rany postrzałowe powinny być zapakowane gazą, aby ucisnąć krwawiące naczynie krwionośne).

Bandaż elastyczny zawiera poprzecznie rozmieszczone cienkie taśmy typu rzep, które zapobiegają przypadkowemu rozwinięciu się opatrunku podczas jego stosowania. Funkcja ta zmniejsza również ryzyko zanieczyszczenia opatrunku, szczególnie w trudnych warunkach, takich jak pustynia czy lasy tropikalne. Taśmy stabilizują także opatrunek po jego ostatecznym zamocowaniu, co eliminuje możliwość przypadkowego rozwinięcia się bandaża w sytuacji silnego stresu.

Wewnątrz opatrunku OLAES znajduje się plastikowa folia, która pełni funkcję opatrunku okluzyjnego na rany postrzałowe klatki piersiowej oraz działa jako izolacja termiczna.

## Specyfikacja:

- Bandaż elastyczny: szerokość 10 cm, długość 120 cm
- Kompres na ranę: 10 x 15 cm
- Gaza rolowana: szerokość 9 cm, długość ok. 250 cm
- Folia uszczelniająca rany klatki piersiowej: 5 x 7 cm
- Orientacyjne wymiary zapakowanego próżniowo opatrunku: 10 x 5 x 4 cm

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

TacMed Solutions, LLC, Stany Zjednoczone

### **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

Casus Europe B.V., Holandia

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

TacMed Solutions, LLC, Stany Zjednoczone

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.