

# TRENAŻER TAMOWANIA KRWOTOKU - MIEDNICA (TECHLINE - B-CON TRAINER™)



B-CON PTT (Bleeding Control Part Task Trainer™) firmy Techline Technologies to realistyczny symulator dolnej części tułowia zaprojektowany do szkolenia z zakresu kontroli masywnego krwotoku. Model odwzorowuje urazy takie jak całkowita amputacja kończyny dolnej oraz rana postrzałowa w okolicy pachwinowej, umożliwiając prowadzenie realistycznych ćwiczeń dla ratowników medycznych, personelu medycznego oraz służb mundurowych.

**Uwaga! W zestawie znajduje się wyłącznie trener. Opaski widoczne na zdjęciach oraz system symulacji krwi należy zakupić oddzielnie - Techline - Blood Supply Pump.**

**Kod produktu:** PTT-B80-L

---

**Kod produktu:** PTT-B80-L

**27 900,00 zł z VAT, 22 682,93 zł netto**

## Opis

B-CON PTT (Bleeding Control Part Task Trainer™) firmy Techline Technologies to realistyczny symulator dolnej części tułowia zaprojektowany do szkolenia z zakresu kontroli masywnego krwotoku. Model odwzorowuje urazy takie jak całkowita amputacja kończyny dolnej oraz rana postrzałowa w okolicy pachwinowej, umożliwiając prowadzenie realistycznych ćwiczeń dla ratowników medycznych, personelu medycznego oraz służb mundurowych.

Symulator wyposażony jest w mechanicznie reagujący system symulacji krwawienia, który reaguje na zastosowane procedury ratownicze. Dzięki temu kursanci mogą trenować m.in. zakładanie opasek uciskowych, opasek typu AAJT-S lub SJT, ucisk bezpośredni, ucisk proksymalny oraz pakowanie ran, obserwując zatrzymanie krwawienia po prawidłowym wykonaniu interwencji.

Model wykonany jest z wysokiej jakości silikonu z wielowarstwową strukturą kolorystyczną, która zwiększa realizm symulacji. Zastosowany materiał SOFTTECH® zapewnia naturalne odczucie pracy z tkanką, a elementy kostne wykonane w technologii ROCKTECH® odwzorowują realistyczny opór struktur anatomicznych. Wewnętrzna konstrukcja z odlewu aluminiowego zapewnia dużą wytrzymałość i umożliwia stosowanie silnego ucisku, nawet z wykorzystaniem ciężaru ciała podczas ćwiczeń.

Wbudowany system przewodów umożliwia podłączenie symulowanego krwawienia (np. do systemu SKEDCO® FEBSS lub innych systemów symulacji krwi – sprzedawanych oddzielnie). Podczas ćwiczeń przepływ symulowanej krwi reaguje na zastosowane procedury ratownicze, takie jak ucisk bezpośredni, pakowanie rany czy zastosowanie opaski uciskowej, co pozwala realistycznie trenować techniki kontroli masywnego krwotoku.

### **Najważniejsze cechy**

- realistyczny trening kontroli masywnego krwotoku
- symulacja amputacji kończyny dolnej i rany pachwinowej
- możliwość treningu opasek uciskowych, opasek junctionalnych, ucisku bezpośredniego oraz pakowania ran
- mechanicznie reagujący system symulacji krwawienia
- realistyczne materiały SOFTTECH® i ROCKTECH®
- wytrzymała konstrukcja z odlewu aluminiowego
- możliwość pracy z systemem krwawienia lub w trybie „dry training”
- odpowiedni do szkoleń ratowniczych, medycyny taktycznej oraz programów Stop the Bleed

### **Konserwacja**

Po zakończeniu ćwiczeń trenerzy należy przepłukać czystą wodą, a następnie opłukać w ciepłej wodzie i pozostawić do wyschnięcia przed przechowywaniem. Urządzenie można myć w wodzie z łagodnym detergentem lub dezynfekować środkami takimi jak alkohol izopropylowy lub rozcieńczony roztwór wybielacza. Przed schowaniem do walizki należy upewnić się, że symulator jest całkowicie suchy, aby zapobiec powstawaniu pleśni.

**Uwaga! W zestawie znajduje się wyłącznie trenerzy. Opaski widoczne na zdjęciach oraz system symulacji krwi należy zakupić oddzielnie - Techline - Blood Supply Pump.**

### **Bezpieczeństwo**

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

### **Producent**

Techline Technologies, Inc.  
668 Davisville Road  
Willow Grove, PA 19090  
Stany Zjednoczone  
+1 215 657 1909  
sales@techlinetrauma.com

### **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

MED-WAR Tomasz Warzybok  
ul. 11 listopada 5  
62-100 Wągrowiec  
Polska  
+48 516 546 004  
sklep@szkolimy.net

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## **Producent**

Techline Technologies, Inc. 668 Davisville Road Willow Grove, PA 19090 Stany Zjednoczone +1 215 657 1909  
sales@techlinetrauma.com

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.