

ZESTAW 4 FANTOMÓW Z DIODAMI LED I RUCHOMĄ ŻUCHWĄ PRESTAN ADULT JAW THRUST



Zestaw 4 fantomów Prestan Jaw Thrust z ruchomą żuchwą do nauki RKO, zapakowany w poręczną torbę transportową, przeznaczony do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych.

Kod produktu: PP-JTM-400M-MS

GTIN: 811675020039

Kod produktu: FAN-214

GTIN: 811675020039

4 900,00 zł z VAT, 3 983,74 zł netto

Opis

Fantom szkoleniowy Prestan Adult Jaw Thrust to wiernie odwzorowany tors osoby dorosłej z ruchomą żuchwą, dedykowany do prowadzenia szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED. To co sprawia, że amerykańska marka Prestan odniosła globalny sukces i cieszy się bardzo dobrą reputacją na całym świecie, to świetna jakość oferowanych produktów przy zachowaniu bardzo atrakcyjnych cen. Wszystkie fantomy Prestan cechuje wysoka jakość wykonania, precyzyjne odwzorowanie budowy anatomicznej człowieka i ciekawe rozwiązania podwyższające jakość kształcenia i komfort prowadzenia zajęć.

Rozwiązania wspomagające zajęcia szkoleniowe

Fantom szkoleniowy Prestan Adult Jaw Thrust posiada kilka rozwiązań, które pomagają instruktorom w prowadzeniu zajęć i przekazują informacje zwrotne na temat jakości wykonywanych ćwiczeń. Zaliczamy do nich:

- wbudowany **wskaźnik świetlny** (kolorowe diody LED), który informuje czy kursant wykonuje uciski klatki piersiowej w prawidłowym tempie i z odpowiednią siłą, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). Przy każdym ucisku wykonanym przez kursanta, na torsie manekina zapala się odpowiednia lampka określająca jakość ostatniego ruchu
- charakterystyczny sygnał dźwiękowy „**klik-klak**”, który informuje, że poziom kompresji klatki piersiowej przy ucisku osiągnął prawidłową wartość 5 - 6 cm
- unikalny **mechanizm dostosowujący siłę ucisku** klatki piersiowej, który pozwala poczuć kursantowi odpowiedni opór, gdy przekroczy wymagalny poziom kompresji

- wymienione systemy informacji zwrotnej tworzą razem efektywny mechanizm weryfikacji działań kursanta w czasie rzeczywistym, w którym szkolona osoba widzi (diody LED), słyszy (system "klik-klak") i czuje (system oporowy)
- Dzięki **mechanizmowi ruchomej żuchwy** instruktor może chwycić szczękę manekina, unieść ją oraz przesunąć do przodu i do góry

Właściwości produktu w realizacji profesjonalnych szkoleń


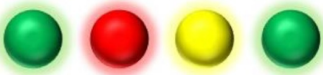






Fantom Prestan daje kursantowi możliwość prowadzenia wszystkich działań ratowniczych z zakresie pierwszej pomocy (BLS). Manekin charakteryzuje bardzo dobre odwzorowanie anatomiczne budowy ciała dorosłego człowieka, co sprawia, że zajęcia szkoleniowe są bardzo realistyczne. W tym zakresie ważną rolę odgrywa:

- wzorowe odtworzenie anatomii i fizjonomii dorosłego człowieka
- widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne takie jak żebra, mostek i sutki, które pomagają zlokalizować właściwe miejsce ucisku oraz przyklejenia elektrod defibrylatora AED
- mechanizm wymagający odchylenie głowy do tyłu w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych
- widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji
- rękoczyn uciśnięcia nadbrzusza, który daje możliwość nauki techniki udzielenia pomocy przy zadławieniu

Charakterystyka użytkowa

Prestan Adult Jaw Thrust to wysokiej jakości produkt szkoleniowy, który posiada **najdłuższą na rynku gwarancję** producencką wynoszącą **3 lata** od momentu zakupu (standardem dla podobnych produktów jest gwarancja na okres 2 lat). To co warto podkreślić, to również jego właściwości użytkowe. Manekin bardzo łatwo utrzymać w czystości, gdyż skóra fantomu jest łatwo zmywalna. Ponadto, Prestan Adult Jaw Thrust jest kompaktowy i lekki, co ma znaczący wpływ na komfort przy jego transporcie. Do tego celu służy nam torba transportowa znajdująca się w zestawie z fantomem, która może być także wykorzystywana jako mata podczas szkoleń.

Opis działania wskaźnika LED

Fantom wyłączony lub w trybie uśpienia	
W przypadku pierwszego pełnego ucisku wykonywany jest test diod LED	
Poniżej 60 ucisków na minutę	
Od 60 do 79 ucisków na minutę	
Od 80 do 99 ucisków na minutę	
Od 100 do 120 ucisków na minutę	
Powyżej 120 ucisków na minutę (żółta dioda miga)	
Przerwanie uciskania klatki piersiowej (czerwona dioda miga)	

Skład oferowanego zestawu

- 4x fantom osoby dorosłej z diodami LED i ruchomą żuchwą Prestan Adult Jaw Thrust
- 50 szt. wymiennych dróg oddechowych
- torba transportowa, która pełni także rolę maty ćwiczeniowej

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

PRESTAN Products, LLC
5101 Naiman Parkway,
Solon, OH 44139
Stany Zjednoczone
+1 800 434 7989
info@prestanproducts.com

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

PRESTAN Europe B.V.
Celsiusstraat 15
6003 DG Weert
Holandia

+31 495 76 01 55

info@prestaneurope.eu

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

PRESTAN Products, LLC 5101 Naiman Parkway, Solon, OH 44139 Stany Zjednoczone +1 800 434 7989

info@prestanproducts.com

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.