

## ZESTAW 4 FANTOMÓW Z DIODAMI LED PRESTAN ADULT



Zestaw 4 fantomów Prestan do nauki RKO marki, zapakowany w poręczną torbę transportową, przeznaczony do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych.

**Kod produktu:** PP-AM-400M-MS

**GTIN:** 811675020022

---

**Kod produktu:** FAN-207

**GTIN:** 811675020022

**4,570,00 zł z VAT, 3,715,45 zł netto**

### Opis

Fantom szkoleniowy Prestan Adult to wiernie odwzorowany tors osoby dorosłej, dedykowany do prowadzenia szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED. To co sprawia, że amerykańska marka Prestan odniosła globalny sukces i cieszy się bardzo dobrą reputacją na całym świecie, to świetna jakość oferowanych produktów przy zachowaniu bardzo atrakcyjnych cen. Wszystkie fantomy Prestan cechuje wysoka jakość wykonania, precyzyjne odwzorowanie budowy anatomicznej człowieka i ciekawe rozwiązania podwyższające jakość kształcenia i komfort prowadzenia zajęć.

### Rozwiązania wspomagające zajęcia szkoleniowe

Fantom szkoleniowy Prestan Adult posiada kilka rozwiązań, które pomagają instruktorom w prowadzeniu zajęć i przekazują informacje zwrotne na temat jakości wykonywanych ćwiczeń. Zaliczamy do nich:

- wbudowany **wskaźnik świetlny** (kolorowe diody LED), który informuje czy kursant wykonuje uciski klatki piersiowej w prawidłowym tempie i z odpowiednią siłą, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). Przy każdym ucisku wykonanym przez kursanta, na torsie manekina zapala się odpowiednia lampka określająca jakość ostatniego ruchu
- charakterystyczny sygnał dźwiękowy „**klik-klak**”, który informuje, że poziom kompresji klatki piersiowej przy ucisku osiągnął prawidłową wartość 5 – 6 cm
- unikalny **mechanizm dostosowujący siłę ucisku** klatki piersiowej, który pozwala poczuć kursantowi odpowiedni opór, gdy przekroczy wymagalny poziom kompresji
- wymienione systemy informacji zwrotnej tworzą razem efektywny mechanizm weryfikacji działań kursanta w czasie rzeczywistym, w którym szkolona osoba widzi (diody LED), słyszy (system “klik-klak”) i czuje (system oporowy)

### Właściwości produktu w realizacji profesjonalnych szkoleń

Fantom Prestan daje kursantowi możliwość prowadzenia wszystkich działań ratowniczych z zakresie pierwszej pomocy (BLS). Manekin charakteryzuje bardzo dobre odwzorowanie anatomiczne budowy ciała dorosłego człowieka, co sprawia, że zajęcia szkoleniowe są bardzo realistyczne. W tym zakresie ważną rolę odgrywa:

- wzorowe odtworzenie anatomii i fizjonomii dorosłego człowieka
- widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne takie jak żebra, mostek i sutki, które pomagają zlokalizować właściwe miejsce ucisku oraz przyklejenia elektrod defibrylatora AED
- mechanizm wymagający odchylenie głowy do tyłu w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych
- widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji
- rękoczyn uciśnięcia nadbrzusza, który daje możliwość nauki techniki udzielenia pomocy przy zadławieniu

### Charakterystyka użytkowa

Prestan Adult to wysokiej jakości produkt szkoleniowy, który posiada **najdłuższą na rynku gwarancję** producencką wynoszącą **3 lata** od momentu zakupu (standardem dla podobnych produktów jest gwarancja na okres 2 lat). To co warto podkreślić, to również jego właściwości użytkowe. Manekin bardzo łatwo utrzymać w czystości, gdyż skóra fantomu jest łatwo zmywalna. Ponadto, Prestan Adult jest kompaktowy i lekki, co ma znaczący wpływ na komfort przy jego transporcie. Do tego celu służy nam torba transportowa znajdująca się w zestawie z fantomem, która może być także wykorzystywana jako mata podczas szkoleń.

### Opis działania wskaźnika LED

|                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fantom wyłączony lub w trybie uśpienia                              |  |
| W przypadku pierwszego pełnego ucisku wykonywany jest test diod LED |  |
| Poniżej 60 ucisków na minutę                                        |  |
| Od 60 do 79 ucisków na minutę                                       |  |
| Od 80 do 99 ucisków na minutę                                       |  |
| Od 100 do 120 ucisków na minutę                                     |  |
| Powyżej 120 ucisków na minutę (żółta dioda miga)                    |  |
| Przerwanie uciskania klatki piersiowej (czerwona dioda miga)        |  |

## **Skład oferowanego zestawu**

- 4x fantom osoby dorosłej z diodami LED Prestan Adult
- 50 szt. wymiennych dróg oddechowych
- torba transportowa, która pełni także rolę maty ćwiczeniowej

## **Bezpieczeństwo**

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

### **Producent**

PRESTAN Products, LLC

5101 Naiman Parkway,

Solon, OH 44139

Stany Zjednoczone

+1 800 434 7989

info@prestanproducts.com

### **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

PRESTAN Europe B.V.

Celsiusstraat 15

6003 DG Weert

Holandia

+31 495 76 01 55

info@prestaneurope.eu

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

PRESTAN Products, LLC 5101 Naiman Parkway, Solon, OH 44139 Stany Zjednoczone +1 800 434 7989

info@prestanproducts.com