

ZESTAW DO PŁUKANIA OKA ZPO



Zestaw do płukania oka ZPO przeznaczony jest do przepłukiwania zaprószonych czynnikiem obcym oczu. Znajduje podobne zastosowanie jak aparat do płukania oka.

Kod produktu: 091

GTIN: 5902138051914

Kod produktu: DRO-088

GTIN: 5902138051914

9,00 zł z VAT, 8,33 zł netto

Opis

Zestaw do płukania oka ZPO przeznaczony jest do przepłukiwania zaprószonych czynnikiem obcym oczu. Znajduje podobne zastosowanie jak aparat do płukania oka.

Zestaw składa się z następujących elementów

- kieliszek
- 2x ampulka z 10 ml roztworu

Sposób użycia

Kieliszek należy przepłukać np. przegotowaną wodą, napęlić go roztworem z załączonych ampulek, a następnie pochylić głowę i przyłożyć szczelnie krawędzie kieliszka do oczodołu. Kolejno unieś głowę, aby spowodować wypływ wody z kieliszka i przepłukanie zaprózonego oka w celu usunięcia ciała obcego, w czasie przepłukiwania oka zaleca się poruszanie powiekami.

Zestaw jest pakowany wraz z kartonikiem informacyjnym w szczelnie zgrzanym woreczku z folii PE

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Stanmark Mark Kubik, Polska

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Stanmark Mark Kubik, Polska

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.